

# ICON® Strep A

Prueba de antígeno  
inmunoquímica

*...hace posible que los niños  
puedan volver a jugar lo  
más rápido posible*

## ICON® Strep A

es un inmunoensayo cualitativo para comprobar rápidamente el antígeno de los estreptococos del grupo A del exudado faríngeo.

Las tiras de test son muy fáciles de usar y ofrecen el resultado en tan solo 5 minutos, de forma que se pueda comenzar de inmediato el tratamiento correcto.

Con su alta sensibilidad (97%) y especificidad (95%) esta prueba ayuda a contrarrestar en los niños la faringitis desde su inicio, así como el peligro de que se produzcan daños en las articulaciones, el corazón o los riñones, gracias a un tratamiento adecuado con antibióticos.



 **BECKMAN  
COULTER®**  
Primary Care Diagnostics

# ICON® *DS* Strep A



## Características

En un estudio realizado en tres centros médicos a 499 pacientes con síntomas de faringitis se obtuvieron los siguientes resultados :

ICON® <i>DS</i> Strep A	Prueba frente a cultivo	
Sensibilidad	97%	120/124
Especificidad	95%	355/375
Exactitud	95%	475/499
PPV	86%	120/140
NPV	99%	355/359

En 475 de los 499 pacientes se obtiene sin cultivo el resultado correcto en el plazo de 5 minutos.

## Prueba de antígeno inmunoquímica

- 25 tiras reactivas
- 25 tubos de test desechables para la extracción
- 25 hisopos faríngeos estériles
- 1 botella de reactivo A
- 1 botella de reactivo B
- 1 botella para el control positivo
- 1 botella para el control negativo
- 1 instrucciones para el uso

Almacenamiento a temperatura ambiente


Nº de pedido: 72025

## ICON® *DS* Strep A

INSTRUCCIONES PARA EL USO – Antes de ejecutar la prueba lea las instrucciones del producto

### Procedimiento de la prueba


- Mantenga la botella vertical. Vierta 4 gotas del reactivo A y 4 gotas del reactivo B en el mismo tubo.
  - Para mezclar el líquido golpee ligeramente el extremo inferior del tubo.

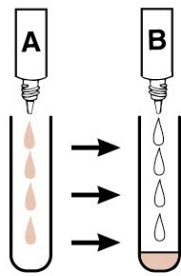


- Introduzca el hisopo en el tubo.
  - Gire el hisopo 10 veces en el tubo.
  - Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto.
  - Luego, saque el hisopo del tubo: Presione el hisopo contra la pared interior del tubo y extraiga el hisopo de forma que la mayor cantidad del líquido se quede en el tubo.



- Coloque la tira reactiva en el tubo.
  - El líquido debe llegar hasta o justo debajo de la línea MÁX.
  - Lea el resultado a los 5 minutos

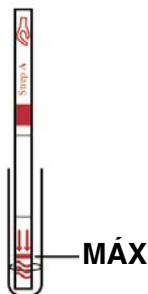

### Interpretación de los resultados

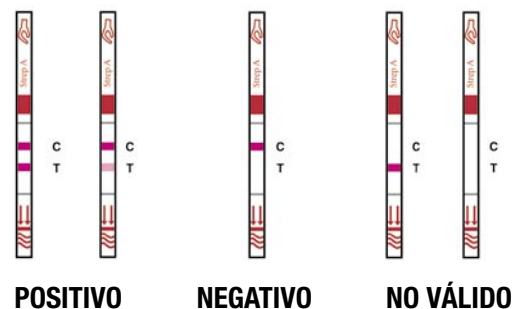

Distribuidor en España:



Gibralfarma s.l.  
C / La Prensa 7 2º  
29007 Malaga

Tel: 952 286 712  
Fax: 952 614 646  
www.gibralfarma.com